

## Serviceprogramma voor mensen met een stoma

Speciaal voor u heeft **Coloplast** een uniek service programma ontwikkeld. Profiteer ook van de vele voordelen van deze service: gratis handige service-artikelen, deskundig advies en 4x per jaar **Coloplast Care Nieuws** met informatie en tips op het gebied van stomazorg.

Wanneer u zich nu aanmeldt, ontvangt u een handige attentie. Inschrijven kan via internet: [www.coloplast.nl](http://www.coloplast.nl). Bellen kan natuurlijk ook: 0800-022 98 98.



POSTZEGEL NIET NODIG



**Coloplast** Care  
Antwoordnummer 40  
3800 VB AMERSFOORT



Coloplast BV  
Postbus 1111  
3800 BC Amersfoort  
[www.coloplast.nl](http://www.coloplast.nl)



SenSura 2-delige  
Colostomazakjes

# SenSura Click

hoorbare zekerheid



**SenSura**

 Coloplast

# Het meest gehoorde verzoek van een stomadrager...

... is een betere huidplak - het belangrijkste onderdeel van een stomaopvangsysteem. Samen met stomaverpleegkundigen en stomadragers werkten wij aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard in stomazorg; **SenSura**.

*"Ik had voorheen nogal eens een rode huid rond mijn stoma. Bovendien had ik, wanneer het wat warmer weer was, last van lekkages. Ik voelde me niet altijd zeker van mijn stomasysteem"*

*"Nu ik **SenSura** gebruik, is mijn huid gaaf en gezond. Lekkages heb ik niet meer gehad, **SenSura** is echt een huidvriendelijk systeem"*




# Huidbescherming

De **SenSura** huidplak is bijzonder huidvriendelijk door de speciale samenstelling uit twee lagen. De onderlaag hecht zeer goed op de huid en kan veel transpiratie absorberen, waardoor de huid gezond blijft. De bovenlaag is heel goed bestand tegen de inwerking van ontlasting. De huidplak blijft intact en beschermt zo uw huid.

Opvallend is ook de flexibiliteit van **SenSura**. De **SenSura** huidplak is ovaal en voorzien van flexpatronen. Hierdoor is de huidplak zeer soepel en volgt uw bewegingen zonder dat u de plak voelt.

**SenSura** geeft uw huid optimale bescherming en is tegelijkertijd erg comfortabel en discreet.

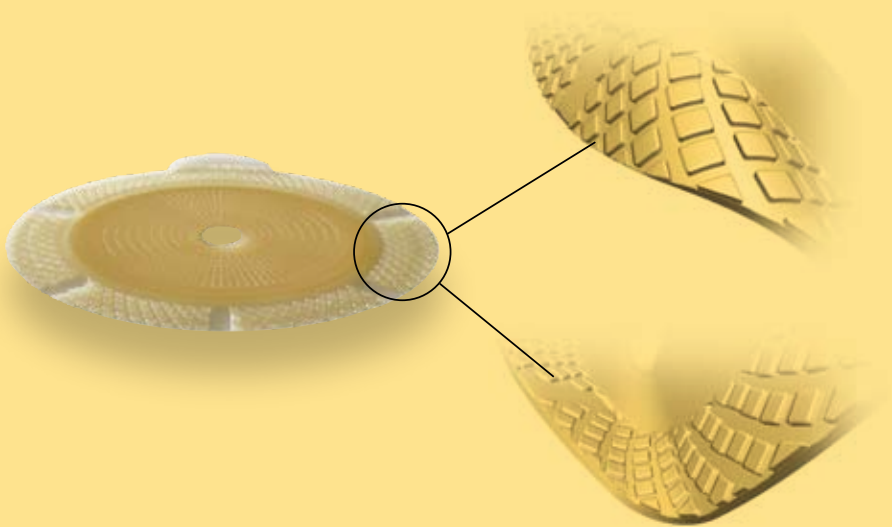

**SenSura**



# SenSura Click: hoorbare zekerheid

**SenSura Click** heeft een bijzondere koppeling. Wanneer het zakje op de huidplak wordt bevestigd, kunt u de extra borging dichtklikken. Wanneer u de “klik” hoort, weet u zeker dat het zakje goed op de huidplak vastzit. Een hoorbare zekerheid!



## 1.

Bevestig het zakje op de huidplak. Zorg dat de borging van het zakje geheel om de flens van de huidplak zit.



## 2.


Het zakje zet u vast door de clipjes van de borging naar elkaar toe te duwen. Neem de witte sluiting tussen duim en wijsvinger en duw de sluiting dicht. U hoort dan een klik. Controleer of de borging goed vast zit door even aan het zakje te trekken.

Om het zakje van de huidplak af te halen, duwt u met uw vingertop in het witte klipje. Wanneer u de klik hoort, is het zakje weer los en kunt u het verwisselen.

# SenSura met uniek duofilter

## Ovaal filter met groter oppervlak

- lucht passeert
- vocht wordt tegengehouden

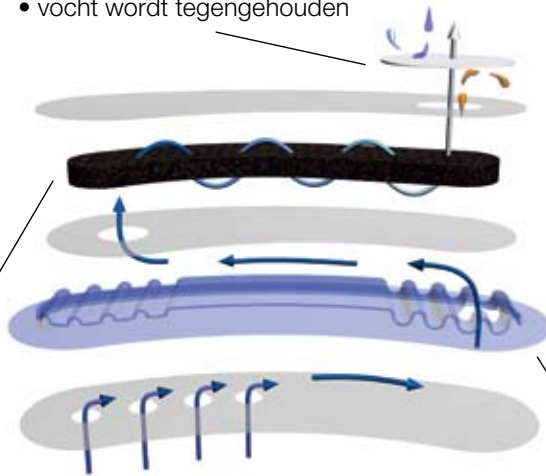

## Carbonfilter

- effectieve geurneutralisatie

## Nieuw filter met golfstructuur

- houdt de ontlasting tegen voordat het carbonfilter bereikt wordt. Dit voorkomt lekkage en verlengt de levensduur van het filter

Alle **SenSura** zakjes zijn uitgevoerd met het unieke duofilter. Dit zorgt ervoor dat een dubbele hoeveelheid lucht het zakje kan verlaten. Mogelijk opbollen van uw zakje wordt hiermee voorkomen. Daarnaast kan een duofilter twee keer zoveel geurtjes neutraliseren. Het duofilter kan de draagtijd van uw zakje verlengen.

# Gebruiksaanwijzing

## Aanbrengen van de huidplak

Wanneer u geen voorgestante huidplak hebt, is het belangrijk dat u de huidplak goed op maat knipt. Neem regelmatig de maat van uw stoma op, uw stoma kan in de loop van de tijd van omvang veranderen. Gebruik een stomamal of een stomamaatkaartje om de juiste maat te bepalen.



Op de transparante beschermfolie van de **SenSura** huidplak staan de maten aangegeven. Knip de huidplak op maat. Dit kunt u het beste doen met een gebogen schaar. Knip de opening 1 mm groter dan uw stoma. Maak vervolgens de kniprand met uw vingers glad.



Zorg ervoor dat uw huid tijdens het aanbrengen schoon en droog is. Breng de huidplak eerst op lichaamstemperatuur door deze even tussen uw handen op te warmen. Verwijder daarna de transparante beschermfolie van de huidplak met behulp van het verwijderlipje.

Plaats vervolgens de huidplak van onder af op de huid, waarbij u erop let dat deze goed rondom de stoma aansluit. Let erop dat de huid glad is. Druk de huidplak rond de stoma stevig aan, door met de vingers van onder naar boven te drukken.



## Bevestigen van het zakje

Zorg dat de borgring open is.

Leg de flens van het zakje aan de onderkant tegen de flens van de huidplak en druk de ring aan. Dit kunt u het beste doen, wanneer u van onder af twee vingers gelijktijdig naar boven beweegt om zo het zakje aan te drukken.



Het zakje zet u vast door de clipjes van de borgring naar elkaar toe te duwen. U hoort dan een klik. Controleer door aan het zakje te trekken of de borgring goed vast zit.



## Draaien van het zakje

Het zakje kan op de huidplak in verschillende posities worden bevestigd. U kunt zo zelf bepalen waar u de sluiting van het zakje wilt dragen. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld gaat slapen.

1. Klik de borgring open door met uw vinger in het klipje te drukken



2. U kunt nu het zakje in elke gewenste positie draaien.



3. Sluit de borgring weer door met duim en wijsvinger het klipje dicht te klikken.



### **Verwijderen van het zakje**

Open de borgring door met uw vingertop in het klipje te drukken.

Houd de huidplak tegen en verwijder het zakje door het van de huidplak af omhoog te trekken.



### **Filterstickers**

Filterstickers kunnen handig zijn als de filters niet nat mogen worden (bijv. tijdens het douchen). Als u beide filters afplakt, kunnen de gassen niet meer uit het zakje. Neem twee witte stickers van de bijgevoegde strook uit de verpakking en plaats deze over de beide openingen van de filters.

# Assortiment

**SenSura** Click 2-delige colostomazakjes zijn verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen, allen met duofilter.

## SenSura huidplak met bevestigingsogen

Artikelnr.	Omschrijving	Flensmaat	Opening
10011	<b>SenSura</b> huidplak, uitknipbaar	40 mm	10-35 mm
10012	<b>SenSura</b> huidplak, voorgestanst	40 mm	20 mm
10013	<b>SenSura</b> huidplak, voorgestanst	40 mm	25 mm
10021	<b>SenSura</b> huidplak, uitknipbaar	50 mm	10-45 mm
10022	<b>SenSura</b> huidplak, voorgestanst	50 mm	30 mm
10023	<b>SenSura</b> huidplak, voorgestanst	50 mm	35 mm
10031	<b>SenSura</b> huidplak, uitknipbaar	60 mm	10-55 mm
10032	<b>SenSura</b> huidplak, voorgestanst	60 mm	40 mm

## SenSura huidplak Convex Light met bevestigingsogen

Artikelnr.	Omschrijving	Flensmaat	Opening
11011	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, uitknipbaar	40 mm	15-23 mm
11012	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, voorgestanst	40 mm	21 mm
11021	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, uitknipbaar	50 mm	15-33 mm
11022	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, voorgestanst	50 mm	25 mm
11023	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, voorgestanst	50 mm	28 mm
11024	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, voorgestanst	50 mm	31 mm
11031	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, uitknipbaar	60 mm	15-43 mm
11032	<b>SenSura</b> huidplak Convex Light, voorgestanst	60 mm	35 mm

## SenSura 2-delige colostomazakjes met duofilter

Artikelnr.	Uitvoering	Flensmaat
13304	Mini, soft fronting	40 mm
13305	Mini, soft fronting	50 mm
13306	Mini, soft fronting	60 mm
13314	Midi, soft fronting	40 mm
13315	Midi, soft fronting	50 mm
13316	Midi, soft fronting	60 mm
13324	Maxi, soft fronting	40 mm
13325	Maxi, soft fronting	50 mm
13326	Maxi, soft fronting	60 mm
13394	Maxi, transparant	40 mm
13395	Maxi, transparant	50 mm
13396	Maxi, transparant	60 mm

Wilt u **SenSura** 2-delig proberen? Vraag dan het gratis testpakket aan! Vul de bon in of bel gratis 0800-022 98 98. Een e-mail sturen kan ook: [nlcare@coloplast.com](mailto:nlcare@coloplast.com)



## Coloplast Care

Bij **Coloplast** Care kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van stoma- en continenzorg. Of het nu om producten gaat of andere zaken die hiermee te maken hebben; de medewerkers van **Coloplast** Care geven u deskundig advies. U kunt hen bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-022 98 98. Of stuur een e-mail naar [nlcare@coloplast.com](mailto:nlcare@coloplast.com)

---

## Antwoordkaart

**Ja**, ik wil graag gratis een proefpakket ontvangen van **SenSura** 2-delige colostomazakjes.



Voorletters:..... Naam:..... m/v

Adres:.....

Postcode:..... Woonplaats:.....

Tel.: ..... E-mail:.....

Geb. jaar: .....

Uitvoering:     mini                       midi                       maxi  
Flensmaat:     40 mm                       50 mm                       60 mm  
Huidplak:      Vlak                               Convex Light